

クラスB オートクレーブ BC-17点検表

お客様 お名 様	名称	近藤歯科医院	器具番号	14080169	点検実施日	2017.6.6	作業 印
	住所	名古屋市井ノ口新地12-19	運転時間	1115回	点検実施者	山本 誠	
	納入場所		サービス形態		モリタ設備部		

計装(安全)

- 圧力計の点検指示誤差
- ドア
- フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- 開閉ハンドル取り付け状態・動作確認
- フック取り付け状態・動作確認
- フックバネ・フック調整ピンの取り付け状態
- ボス・ナット・ホーローゼット増し締め
- ドアカバーの取り付け状態・割れ
- フック検出ユニット動作確認
- ドアロックユニット動作確認
- 窓枠のキズ・汚れ

筐体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 温度湿度センサの汚れ
- 動力コの取損・汚れ
- 筐内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ファン駆動チューブ・継手の損傷・漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- 給気弁の動作状態・漏れ
- 排気弁の動作状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の動作状態・漏れ
- 蒸気弁の動作状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の動作状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(減圧)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧検知圧カスインサの動作状態・漏れ
- ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 温度防止器・温度センサ取り付け状態
- 電熱ポンプの動作状態・異常・漏れ
- 逆戻弁の動作状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 蓋・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの動作状態・漏れ

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
- フロートスイッチの動作状態・漏れ

電装系

- タッチパネルの動作状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの動作状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・上れ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の劣色・損傷有無・結露状態
- 圧力センサの取り付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・劣色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準線以内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアフィルターのつまり・汚れ

性能評価

- B/Dテスト実施
  - ケミカルインジケータによる判定
- リークチェック
- キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドレン管	1

株式会社HIE  
機械事業本部営業部 営業センター  
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大井1-70-6  
TEL 086-944-6528 FAX086-942-9030