

ICW IM-205-1



株式会社IHIBAWA
機械事業本部 営業サービスグループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地170-8
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHシバウラ用

お客様	名称	つばし 歯科医院	製造番号	100241	ご確認	落合
	住所	静岡県浜松市中区中島1-5-1	納入日	2017. 8/16		
		納入検査実施者	エムシーサービス(株) 河野			

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認	
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ	
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと	
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認	
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認	
	✓	洗剤投入量の確認 (50cc)テスト時		有	ラック仕様切換(ハットピースラック・標準ラック)	
	✓	ローラーポンプの動作確認		無	温水使用切換 (温水使用)	
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)	
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一致	
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水/湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付	
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		✓	運転・お手入れ方法の説明	
	✓	給湯温度(45~50℃) 45℃設定	その他	✓	装置内運転時異音・振動	
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転検査結果	✓	良好	トシ
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認		□	不良	
	✓	電源スイッチの作動状態				
	✓	SDカードの挿入・取外性				
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)				
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ				

特記事項