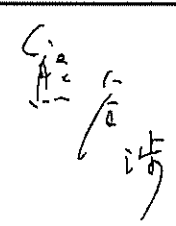


株式会社IHIアグリテック
 環境プロジェクト部 サービスグループ
 〒704-8122
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL 086-944-6528
 FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHIシバウラ用

お客様	名称	くまがい歯科医院	製造番号	100270	ご確認	
	住所	三重県伊勢市旭町 398-7	納入日	2018.3.14		
			納入検査実施者	エムシービス(株) 名田 野田		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	洗剤投入量の確認		✓	ラック仕様切換(ハントビースラック・標準ラック)
	✓	ローラーポンプの動作確認		有・(無)	温水使用切換
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ		評価 性能 その他	✓
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)	✓		周波数と設置ICWの一致
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水／湯逆配管NG)	✓		付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)	✓		運転・お手入れ方法の説明
	✓	給湯温度(45～50℃)	✓		装置内運転時異音・振動
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転 検査 結果	☒ 良好	トシ
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認		☐ 不良	
	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDカードの挿入・取外性			
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

特記事項