


宛先 株式会社モリタ 名古屋支店 田中 様	発信 平成30年3月30日 (株) IHI アグリテック (旧社名: IHI シバウラ) 環境プロジェクト部 サービスGr 中澤 一裕
写) 宛先	電話 (086) 944-6528 ファクシミリ (086) 942-9030
件名 IC ウォッシャー No.8 洗剤供給異常 補足説明	

拝啓 時下 ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
 日頃は大変お世話になっております。
 早速ですが水谷歯科様へのご説明文を作成しました。


「主電源スイッチ」を切ると警告画面が出ないまま異常が出る
 可能性がありますので、この点を中心に経過観察したいと思います。

—記—

- 1 : 洗剤残量センサーにつきまして
 フロート式のセンサーで、液面が下がると
 フロートが下がり、検知状態になります。

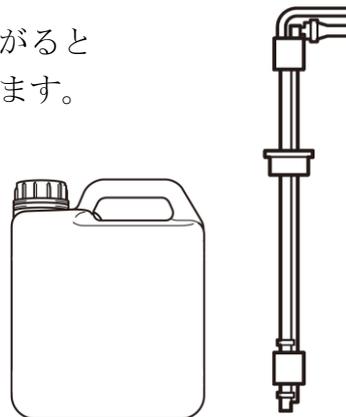

- 2 : 警告メッセージにつきまして
 洗剤残量センサーが検知してから5回後にメッセージが表示し、以後毎回表示します。

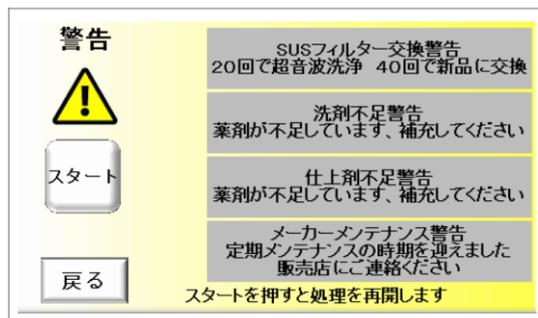

- 3 : 警告メッセージが表示しない条件
- ・主電源スイッチをOFFにして「5回」の記憶が消えた場合
 - ・洗剤容器を大きく傾けてセンサーが動いた場合
 - ・洗剤残量センサーの動作不良、故障