

D 作業報告書

報告者	はんだ塗料		様	ご承認印	
住所	愛知県名古屋市中区栄三丁目1番3号		須崎		
TEL	0569-26-3388	署名		依頼	様
機種型式	IC Washer (洗浄機)		号機	運転回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	100169
取扱業者名	(株)IHエスサービス		様	ご担当者	中村 様

ご依頼内容・現象

WD-130 引取り、IC Washer 設置依頼

原因

処置

WD-130 引取り

IC Washer 設置

引取り運転

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

箇の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 副紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 11 月 16 日

保守形態

1 保守契約 ☐ 2 性能点検 ☐ 3 性能点検 ☐ 4 点検 ☐ 5 点検 ☐ 9 点検外 (摘要√)

サービス形態

1 保守期間 ☐ 2 ステップ ☐ 3 CM ☐ 医療機器 ☐ 区分 ☐ 特管 ☐ 非特管 ☐

作業区分

00 製品販売 ☐ 10 納入設置 ☐ 11 現地調整 ☐ 20 定期点検 ☐ 30 性能検査 ☐ 40 点検 ☐ 50 コール ☐ 60 撤去移設 ☐

70 PR ☐ 72 取扱説明 ☐ 73 改造 ☐ 74 部品納入 ☐ 75 下見 ☐ 77 PC ☐ 80 アフター ☐ 90 その他 ☐

(24時刻で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能検 (見積書No)	35000
2	技術料 H× 名× 円	
3	派遣料 往148x1 名× 100 円	14800
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	
6		

サービスセンター

名古屋SC

TEL 052-66-1611

実施者

高津

メモ

特記事項

①管理 No. 791171

②作業日 20 16 11 16

③Uコード 0568203388

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100169

⑦保守・サービス形態 2-2-10

⑧故障コード 60 - 889 - 9

⑨実施SC 63

⑩技術者 42

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-8-1-2

料金内訳

⑬A

部品代 0

⑭B

技術料等 36 800

⑮

⑯

税別合計金額 36 800

⑰

消費税 2 912

ご請求金額 ¥ 39 312

納品書 No. 6941



株式会社IHI
機械事業本部 営業サービスグループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西天寺新地10-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

お客様	名称	はんだ薬科	製造番号	100169	ご確認	須崎
	住所	愛知県名古屋市中区九条北町33	納入日	2016.11.16		
		納入検査実施者	ILC-サークル (株) 高橋			

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認	
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ	
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと	
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認	
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認	
	✓	洗剤投入量の確認		✓	ラック仕様切替(ハントピースラック・標準ラック)	
	✓	ローラーポンプの動作確認		有・無	温水使用切替	
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能 その他	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)	
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一致	
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付	
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		✓	運転・お手入れ方法の説明	
	✓	給湯温度(45～50℃)		✓	装置内運転時異音・振動	
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転検査結果	☑	良好	トシ
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認		☐	不良	
	✓	電源スイッチの作動状態				
	✓	SDカードの挿入・取外性				
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)				
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ				

特記事項