

株式会社IHIアグリテック  
 環境プロジェクト部 サービスグループ  
 〒704-8122  
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
 TEL 086-944-6528  
 FAX 086-942-9030

## ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

作業者用

|     |    |                  |                   |           |     |    |
|-----|----|------------------|-------------------|-----------|-----|----|
| お客様 | 名称 | おおはし 歯科 フリニッフ    | 製造番号              | 100293    | ご確認 | 田中 |
|     | 住所 | 山形県各務原市蘇原野口町3-16 | 納入日               | 2018.7.29 |     |    |
|     |    | 納入検査実施者          | エムシーサービス(株) 名取 金之 |           |     |    |

| 項目    | 判定 | 検査項目                               | 項目     | 判定                                                         | 検査項目                                |
|-------|----|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ドア    | ✓  | 開閉動作確認                             | 外装・設置  | ✓                                                          | 本体の水平確認 ドアLOCK位置確認                  |
|       | ✓  | ドアパッキンズ・汚れ点検                       |        | ✓                                                          | アジャスタフットの緩み・設置状態                    |
|       | ✓  | ドアロックユニット作動確認                      |        | ✓                                                          | キズ・汚れ                               |
|       | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認                    |        | ✓                                                          | ドア開閉時装置設置位置がずれないこと                  |
|       | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態                   | スペース   | ✓                                                          | 装置設置スペースの確保<br>熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと |
| 洗剤ポンプ | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付                    | 制御     | ✓                                                          | 運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認    |
|       | ✓  | 洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ             |        | ✓                                                          | タッチパネル表示確認・履歴の確認                    |
|       | ✓  | 洗剤投入量の確認                           |        | ✓                                                          | ラック仕様切換(ハントビースラック(標準ラック))           |
|       | ✓  | ローラーポンプの動作確認                       |        | 有・無                                                        | 温水使用切換                              |
| 給排水   | ✓  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ                   | 評価機能   | ✓                                                          | インジケータによる残渣判定(TOSI)                 |
|       | ✓  | 排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)      |        | ✓                                                          | 周波数と設置ICWの一致                        |
|       | ✓  | お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水/湯逆配管NG)        |        | ✓                                                          | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付                 |
|       | ✓  | 給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)          |        | 運                                                          | 転・お手入れ方法の説明                         |
|       | ✓  | 給湯温度(45～50℃)                       |        | ✓                                                          | 装置内運転時異音・振動                         |
| 電装系   | ✓  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ                  | その他    |                                                            |                                     |
|       | ✓  | ディスプレイの色あせ・表示確認                    |        |                                                            |                                     |
|       | ✓  | 電源スイッチの作動状態                        |        |                                                            |                                     |
|       | ✓  | SDカードの挿入・取外性                       |        |                                                            |                                     |
|       | ✓  | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと<br>(漏電・熱注意) |        |                                                            |                                     |
|       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ                 |        |                                                            |                                     |
|       |    |                                    | 運転検査結果 | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 不良 | トシ                                  |

特記事項