

D 作業報告書

お客様	伊藤歯科 様			ご承認印	
住所	名古屋市西区元町3-5-7			(印)	
TEL	052-531-2186	室名		様	
機種型式	WD-150	号機	1104	回	
(完) 継続 有料 無料 製番	13090020				
取扱業者名	(株)IHIサービス 様		ご担当者	安田 様	

ご依頼内容・現象	点検依頼
原因	
処置	点検表に基づく点検。 テスト運転

最終確認チェック

☒ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☒ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 116 年 6 月 16 日

保守形態	1 保守契約	2 作検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 点検外 (摘要)
サービス形態	1 保守契約	2 作検整備	3 CM	医療機器	区分	特 非特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 RC
					80 アフター	90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
002-0110-0	庫ハ、キン L=500	1		
002-0112-0	庫ハ、キン L=500	1		
002-0114-0	洗剤	2		
002-0226-0	DPIチューブ	1		
002-0230-0	箱口アダプター	1		
002-0246-0	HEPAフィルター	1		
002-0142-0	ファット	3	1230	3,990
002-6167-0	配管ゴムC	1		21,100

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	32000
2	技術料 H× 名× 円	
3	派遣料 往32km×1 名× 100 円	3200
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	経費・ホコア交換	5000
6	駐車料	1000

サービスセンター	名古屋SC	実施者	高津
TEL	052-66-1611		

メモ

特記事項

①管理No. V776979V

②作業日 20 116 06 16

③Uコード 0525312186

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造No. 13090020

⑦保守・サービス形態 9-2-80

⑧故障コード 00-999-A

⑨実施SC 63

⑩技術者 6342

⑪同行・応援

⑫原因・処理 8-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬A	部品代 25090
⑭B	技術料等 41200
⑮	
⑯	
税別合計金額	66290
消費税	5303
ご請求金額 ¥	71593
納品書No.	2340

小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150点検表

お客様	名称	伊藤歯科		製造番号	13090020	点検実施日	2016年6月16日	ご承認印	
	住所	名古屋市中区西大田3-15-7		運転時間	1108回	点検実施者	エミール・ビス(株) 高津		
	納入場所			サービス形態	定期・保守・フルメンテ	モリタ担当部署			

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧カススイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆支弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケータによる残渣判定(TOSI)

運転確認

✓

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1
下部シール	1
HEPAフィルター	1
プレフィルター	1
ポンプチューブ	2
循環ポンプ	1
配管ゴム	1
スプレーアーム固定ナット	3



機械事業本部営業部 営業サ

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地 70-6

TEL 086-944-6528 FAX086-942-9030