

D 作業報告書

得意様 タニグチ歯科	様	ご承認印
住所 三重県志摩市阿見町神戸2180-1		
TEL 0599-44-0071	室名	依頼
機種 BC-17(ネト7L-7)	号機	2146 回
完	継続	有料
無料	製番	14070121
取扱業者名 (株)IHエバウ	様	ご担当者 安田 様

ご依頼内容・現象

点検依頼

原因

処置

- BC-17点検表に基づく点検

- ネスト運転

最終確認チェック
☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作
☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言

隣りの機器のコンディション

メーカー

機種

☐異常なし ☐警報・Er
☐漏れあり ☐異音あり
☐破損あり ☐劣化あり

部位

☐図紙添付 ☐あり ☐なし

作業日 20 16 年 9 月 23 日

保守 形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 点検外	(摘要)
サービス 形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器			
作業分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	
						80 アフター	90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	21,000
2	技術料	H× 名× 円	
3	派遣料	往340km×1名× 100円	34,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6	材料道路		8,250

サービスセンター	名古屋SC	実施者	高津
TEL	0584-66-1611		

メモ
特記事項

①管理No	✓786855
②作業日	20 16 6 9 23
③Uコード	0599440071
④⑤機種コード	11 - 09
⑥製造No	14070121
⑦保守・サービス形態	9-2-40
⑧故障コード	00-999-A
⑨実施SC	63
⑩技術者	42
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9-1-1-2

料金内訳

⑬A	部品代	0
⑭B	技術料等	63,240
⑮		

⑯	税別合計金額	63,240
⑰B	消費税	5,059

ご請求金額 ¥	68,299
---------	--------

納品書No	5423
-------	------

クラスB オートクレーブ BC-17点検表

お客様	名称 旭硝子化学工業株式会社	製造番号 14070121	点検実施日 2016年9月23日	承認印 谷口
	住所 愛知県豊田市長阿見町神明230-1	運転時間 2146	点検実施者 山本 淳二 (特) 高津	
	納入場所	サービス形態	モリタ担当部署	

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア**
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック螺絲ピンの取り付け状態
- ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 減菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(減菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアークリーナーのつまり・汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

運転確認

✓

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1



株式会社IHI

機械事業本部営業部 営業サービス
〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地1-70-6
TEL 086-944-6528 FAX086-942-9030