

点検・修理報告書

管理 No. 20181015

発行日: 年 月 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2019 年 2 月 1 日		作業時間: Hr
顧客名	さかもと歯科医院 様	TEL:	
所在地	三重県四日市市富田2-12-13		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	2014 年 9 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14060087	運転回数: 1232
------	----------------	------------


不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー3 機器内漏水

原因

・循環ポンプの配管Cのつなぎ部分より漏水

処置、作業内容

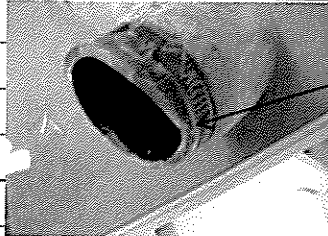

循環ポンプの出口部分より漏水を確認老朽で肉厚が薄くなり漏水していました。
配管Cを交換しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	配管C		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

四日市市富田2丁目12-13
さかもと歯科医院
坂本 充行
ご署名 TEL059-361-6888 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJサービス '19/02/04 富田	環境PJサービス '19/02/04 安田