

2019 年 5 月 29 日

ふみファミリー歯科様

株式会社 I H I アグリテック
環境プロジェクト部

謹啓 貴院益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

お預かりしております、IC WASHER の不具合に関しましてご報告致します。

謹白

1、洗浄槽満水について

運転工程中の停止時および給水時にオーバーフロー域まで水位が上がった場合に
フローセンサーが感知して異常を発報する。

【確認項目】

1. サービス工場にて槽内洗浄を 2 回実施（2 回ともアイエステック投入）
2. 洗浄槽内に 11L 水を溜め、排水時間を 3 回計測

【結論】

1. 岡山工場にて槽内洗浄を連続で 2 回実施した結果、問題なく運転を終了。
2. 洗浄槽内に 12L 水を溜め排水時間を 3 回計測した結果、3 回とも約 50 秒で
排水が完了し、排水ポンプに問題が無い事を確認。
3. 再確認したかった流量センサーと排水速度についても問題ないことがわかった。

【対策・対応】

1. 装置の排水ラインにて、排水ホースにエア溜まりが発生しにくいように排水
ホースの取り回しを調整。（装置内のホース）
2. 現地にて洗浄槽内に 11L 水を溜め、排水時間を計測。排水時間が 1 分を超える
場合は排水溝の圧損が高い事が想定されるため、排水の見直し、排水時間の延
長（90 秒⇒120 秒程度）を実施し様子を見る。
3. 槽内洗浄を実施している時間帯がいつも同じであれば、別の時間帯に実施して
様子を確認。

度重なるご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございませんでした。

今後も社員一丸となり、品質向上に尽力して参りますので、よろしくお願い申し上げます。