

点検・修理報告書

管理 No. 20181015  
発行日： 2019年 12月 25日

|       |                                                                                                                                   |                                                            |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 機種/型式 | WD-150                                                                                                                            |                                                            |         |
| 作業年月日 | 2019 年 12 月 21 日                                                                                                                  |                                                            | 作業時間：Hr |
| 顧客名   | 伝馬歯科 様                                                                                                                            |                                                            | TEL：    |
| 所在地   | 愛知県名古屋市熱田区伝馬 1－5－20                                                                                                               |                                                            | ご担当 様   |
| 販売店   |                                                                                                                                   |                                                            | ご担当 様   |
| 納入年月日 | 2015 年 7 月 30 日                                                                                                                   | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品     |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                               |                                                            |         |
| 出張・引取 | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                            |         |

|                                                                                         |                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 装置情報                                                                                    | 製造番号：14080164               | 運転回数：2176 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                                                         |                             |           |
| ・異臭がする。                                                                                 |                             |           |
| 原因                                                                                      |                             |           |
| ・循環ポンプ出口より少量の洗剤の入った水がもれてそれが水分が蒸発して洗剤の成分が残り<br>機械部の底に溜まりその繰り返しで徐々に洗剤の成分が溜まり匂いの原因と想定されます。 |                             |           |
| 処置、作業内容                                                                                 |                             |           |
| ・洗浄中に配管Cより微量の水をもれを確認しました。<br>ミバンドを増し締めをしてアルコールで底内を洗浄して再度洗浄を繰り返し異臭がないことを確認しまし            |                             |           |
| 特記事項                                                                                    | ・槽内のフィルターが変形していましたので交換しました。 |           |



|                                                                      | 交換部品名称 | 部品コード       | 数量     | 単価 | 小計 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|----|----|
| 1                                                                    |        |             |        |    |    |
| 2                                                                    |        |             |        |    |    |
| 3                                                                    |        |             |        |    |    |
| 4                                                                    |        |             |        |    |    |
| 5                                                                    |        |             |        |    |    |
| 6                                                                    |        |             |        |    |    |
| 7                                                                    |        |             |        |    |    |
|                                                                      |        | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計 |    |    |
|                                                                      |        |             | 技 術 料  |    |    |
|                                                                      |        |             | 出 張 料  |    |    |
|                                                                      |        |             | 合 計    |    |    |
| お客様ご確認署名欄                                                            |        |             |        |    |    |
| 年 月 日                                                                |        |             |        |    |    |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |        |             |        |    |    |
| ご署名 印                                                                |        |             |        |    |    |

修理業者 株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL:086-944-6528  
FAX:086-942-9030

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 責任技術者                       | 作業者                         |
| 環境PJサービス<br>'18/12/21<br>富田 | 環境PJサービス<br>'18/12/21<br>安田 |