

《不具合対応報告書》

担当者: 中野

【発生日】 2019 年 3 月 20 日
 【対応日】 年 月 日
 【連絡元】 ☒モリタ (担当者: 五十里 全 さん)
☐ユーザー
☒その他 (足立デンタルクリニック 岡崎 さん 090-3243-1027)
 【ユーザー名&県名】 愛知県 RYO JIMBO DENTAL

IC Washer【機番: (00-58)】

【症状】
 ・エラー無。
 ・運転終了後に、洗浄槽内に水が残っている。
 (溜まっている)

【対応方法】 ☐引取り修理 (代替機no.)
☐現地対応
 <対応内容> ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【給水方法】 ☐水
☐水 & お湯

【ラック種類】 ☐標準ラック
☐ハンドピース用ラック
 <メクラ栓の使用> ☐有 ☐無
 <SUSフィルターの洗浄> ☐有 ☐無

【備考】
 ・乾燥の使用は不明。
 ・フィルター3は、洗浄してあるので、開かずに下まいる。(クーレンは、インシュレ)
 ・単独では、ワレ水を入れ、排水時間は1'15。: 排水ポンプは、恐らくOK。
 ・3/21に現地確認をお願いします。
 9:30 (3/21)に一度、担当・ヒキダ様へメールをお願いします。 対応の進捗について。
 052-462-1114 担当・ヒキダ様へ連絡して下さい。
 ・その後、名磁DS 岡崎 さん、モリタ 五十里 さんへメールをお願いします。

IC Clave【機番: 】

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理 (代替機no.)
☐現地対応
 <対応内容> ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【給水方法】 ☐アイオニー使用
☐精製水購入
☐その他 ()

【滅菌バッグ】 ☐ディスボ
☐リユース

【網の種類】 ☐トレイ棚
☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】