

点検・修理報告書

管理 No. 20181015
発行日：2019 年 6 月 4 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2019 年 6 月 4 日		作業時間： Hr
顧客名	おもて歯科口腔外科クリニック 様		TEL：
所在地	岐阜県高山市国府町広瀬町1025		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	2015 年 6 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14080157	運転回数： 2340
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・エラー8循環水圧低下、エラー10凝縮タンク満水エラー
- ・洗剤ジャック破損


原因

- ・循環水圧低下は上部スプレーアームの先端ゴムのはずれと下段のスプレーアームが中段のスプレーアームの逆に着いていた為発生したエラーと考えられます。
- ・凝縮タンク満水エラーは排水ポンプから異音がしているので排水ポンプの性能低下して凝縮タンクの水が満水になりエラー発生しました。

処置、作業内容

- ・スプレーアーム先端ゴム取り付け
- ・下段スプレーアーム取り替え
- ・洗剤ジャック交換・排水ポンプ交換・フィルター修理

特記事項

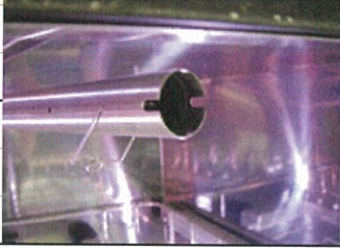



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	洗剤ジャック		1 セット		
2	排水ポンプ		1 ヶ		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

/ 年 8 月 8 日

ご署名 表 理 江 表 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJサービス '19/06/04 富田	環境PJサービス '19/06/04 安田