

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

お客様用
作業者用
IHIAグリテック用

お客様	名称 はるのり歯科	製造番号 14060095	点検実施日 2018・11・5・	承認印	
	住所 愛知県東海市高橋須賀町5-12	運転回数 1525	点検実施者 IHIAグリテックサービスGr		
	納入場所 同上	サービス形態	モリタ担当部署		

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ (HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃 (給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧カスイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取り付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無 (加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

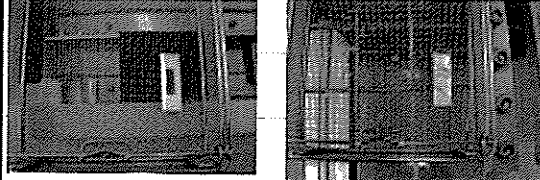
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター (プレ) のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター (メイン) のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定 (TOSI)

運転確認	
☒ 合	☐ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
	

株式会社IHIAグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業専用
IHIアグリテック用

お客様	名称	はるのり歯科	製造番号	14070118	点検実施日	2018-8	IHI承認印	
	住所	愛知県東海市高橋須賀町5-12	運転回数	1322	点検実施者	IHIアグリテックサービスGr		
	納入場所	同上	サービス形態		モリタ担当部署			

計装(安全)

- ☐ 圧力計0点指示誤差
- ドア
- ☐ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☐ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☐ フック取付け状態・動作確認
- ☐ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☐ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☐ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☐ フック検出ユニット動作確認
- ☐ ドアロックユニット動作確認
- ☐ 蓋板のキズ・汚れ
- ☐ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- ☐ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☐ 滅菌温度センサの汚れ
- ☐ 網カゴの破損・汚れ
- ☐ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☐ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☐ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☐ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☐ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☐ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☐ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☐ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☐ ストレーナーの汚れ
- ☐ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☐ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☐ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☐ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☐ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ☐ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☐ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☐ フランジパッキン漏れ
- ☐ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☐ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☐ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☐ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☐ 水漏れ・異常音の確認
- ☐ 真空到達度

給水タンク

- ☐ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☐ 下部給水弁の漏れ
- ☐ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☐ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ (清掃)
- ☐ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☐ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☐ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☐ 電源スイッチの作動状態
- ☐ 行程表示LEDの点灯
- ☐ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☐ 各基板のコネクター緩み確認
- ☐ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☐ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☐ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☐ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☐ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☐ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☐ キズ・汚れ
- ☐ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☐ 運転プログラムの確認
- ☐ 入力・出力確認
- ☐ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ (定期交換)
- ☒ エアフィルターつまり・汚れ (ICG取りつき)

性能評価

- ☐
- ☐ ケミカルインジケーターによる判定
- ☐ リークチェック

インジケータ貼り付け



運転確認

合	否
---	---

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
定期交換ドアパッキン	1
バクテリアフィルター	1
給水ポンプフィルター清掃	
給水タンク清掃	
排水タンク清掃	
排蒸弁フィルター清掃	
機内ホコリ除去	
ケミカルインジケーターによる判定	

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030