

クラスBオートクレープ BC-17点検報告書

モリタ用
作業者用
IHアグリテック用

名前 お客様	伝馬歯科	製造番号 様	13100058	点検実施日	2019.9.6	ご承認印	
住所 納入場所	名古屋市熱田区伝馬1-6-5	運転回数	5028	点検実施者	エムシービス(小林)		
		サービス形態		モリタ担当部署			

計装(安全)

- 圧力計0点指示誤差
- ドア
 - フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
 - 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
 - フック取付け状態・動作確認
 - フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
 - ピス・ナット・ホーローセット増し締め
 - ドアカバーの取り付け状態・割れ
 - フック検出ユニット作動確認
 - ドアロックユニット作動確認
 - 蓋板のキズ・汚れ
 - 開閉ハンドルの損傷確認
- 缶体
 - 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
 - 殺菌温度センサの汚れ
 - 罐カゴの破損・汚れ
 - 缶内ストレーナーの損傷・汚れ
- 配管系
 - フッソ樹脂チューブ・雑手の損傷・漏れ
 - シリコンチューブ・雑手の損傷・漏れ
 - 給気弁の作動状態・漏れ
 - 排蒸弁の作動状態・漏れ
 - 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
 - 殺菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
 - ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
 - ストレーナーの汚れ
 - 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
 - 安全弁(殺菌室)の漏れ
 - 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
 - ダンプナーの漏れ・溶接割れ
 - 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
 - ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 蓋・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価

- B&Dテスト実施
- ケミカルインジケーターによる判定
- リークチェック
- キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け



BMS-Test STEAM

運転確認	
合	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品（名称・型式）	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030