

点検・修理報告書

管理 No. 20181015

発行日: 年 月 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	年 月 日	作業時間:	Hr
顧客名	ゆかデンタルクリニック 様	TEL:	
所在地	愛知県名古屋市中川区供米田2-106 グランドヒルズ供米田3番館	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2014 年 8 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 14080092	運転回数: 3716
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー 30 真空エラー

原因 給水タンクの汚れ・給水ポンプの汚れで水の供給が正常に供給できなかったのが原因と推測されます。

処置、作業内容 給水ポンプのフィルター給水タンクの清掃で処置

給水ポンプのフィルターにもセメント・ゴミ等が付着していました

特記事項

ピンク色の物はバクテリアフィルムが発生してタンク一面に広がり給水が困難になったと想



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018 年 11 月 5 日

ご署名 安藤 由果



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJサービス '19/09/06 富田	環境PJサービス '19/09/06 安田