

点検・修理報告書

管理 No. QM-046

発行日: 2019年 11月 08日

IC Washer			
作業年月日	2019 年 11 月 8 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	つばい歯科医院 様		TEL:
所在地	静岡県浜松市中区中島1-5-1		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 静岡営業所		ご担当 様
納入年月日	2017 年 8 月 16 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☒ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100241	運転回数: 636回	タッチパネルVer.01.08 CPU Ver.001014
------	--------------	------------	--------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ① 循環水圧低下異常（エラー7）
- ② 中段ラックローラーブッシュナットはずれ

原因

- ① 異物噛み込みによりポンプインペラが破損しておりました。
- ② ブッシュナットが緩んでおりました。

処置、作業内容

- ① 循環水ポンプを新品交換いたしました。
- ② ブッシュナットを新品に交換し、緩まないようにしっかりと締め付けました。

特記事項

・循環ポンプに異物が混入し、インペラが破損しておりました。フィルターが正規の取付から少しずれてしまい、異物が通過してしまったと考えられます。位置のずれにくいフィルター（改善品）について入荷次第交換いたします。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環水ポンプ		1		
2	ブッシュナット		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019.11.19 浜松市中区中島一丁目5番1-1
坪井 歯科医院
 坪井 秀 哲
 ご署名 TEL:053-461-4848

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	桐野
'19/11/8	'19/11/8	'19/11/8