

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2020年6月18日

IC washer	
作業年月日	2020年6月18日 作業時間: Hr
顧客名	井上 歯科 医院 様
所在地	愛知県北名古屋市西田村19本1
販売店	株式会社モリタ名古屋支店
納入年月日	2019年2月13日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100318	運転回数: 611	タッチパネル Ver.	CPU Ver.
不具合状況、依頼内容、異常履歴				
エラー2 (洗浄槽満水)				
原因				
排水立ち上げ部に通常よりも少し高く排水工程時に洗浄槽内に水が残ったためエラーが発生したと考えられる。				
処置、作業内容				
排水立ち上げ部の高さ変更作業致しました。(FLから260→140mm)				
特記事項				

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年6月18日

ご署名

深田 綾子

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者