

点検・修理報告書

管理 No. 19088

発行日: 2020年6月3日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2020 年 2 月 28 日		作業時間: Hr
顧客名	コンドウ歯科 様	TEL:	
所在地	愛知県名古屋市中区瑞穂区石川町2-4		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 8 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14060091	運転回数: 5954
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー3 機器内漏水		
原因		
・給水エルボ破損による水漏れ		
・排水センサーブロックより漏れ		
・配管Cのホースバンドより漏れ (出口・エルボ2か所)		
処置、作業内容		
・給水エルボ交換 ・CPU基盤交換		
・排水センサーブロック交換		
・ホースバンド締め付け		
特記事項		
機械室清掃、定期点検実施、各部点検、運転確認		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 L字型ジョイント		1		
2 排水センサーブロック		1		
3 漏洩センサー		1		
4 CPU基盤		1		
5				
6				
7				
		部品代 合計		
		技 術 料		
		出 張 料		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

医療法人 悠桜会 コンドウ歯科

理事長 近藤 昌 嗣

〒467-0005 名古屋市中区瑞穂区石川町2-4

TEL 052-853-1211 FAX 052-853-2266

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '20/06/03 菊池	サービス '20/06/03 富田	サービス '20/06/03 安田

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

お客様
作業時間
IHアグリテック

お客様 ご承認印	名称	コンドウ歯科 様	製造番号	14060091	点検実施日	2020.2.28
	住所	愛知県名古屋市中瑞穂区石川町2-4	運転回数	5954回	点検実施者	IHIアグリテックサービスGr
	納入場所	同上	サービス形態		モリタ担当部署	

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアバッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線・配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継手の損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧カスイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電線系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
- 消耗品
- ☒ ドアバッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアーフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアーフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残液判定(TOSI)

運転確認	
合	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアバッキン	1
ポンプチューブ	2
プレフィルター	1
メインフィルター	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030