

点検・修理報告書

管理 No. 20116
発行日: 2020年8月6日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2020年8月3日		作業時間: 8 Hr
顧客名	GEN DENTAL OFFICE 様		TEL:
所在地	岐阜県本巣郡北方町高屋1333		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	2019 年 1 月 10 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100312	運転回数: 399回
------	--------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー7 循環水圧低下異常が発生した。

原因

・循環ポンプが故障しておりました。

処置、作業内容

・循環ポンプを新品交換いたしました。

特記事項

・スプレーアームの下段と中段が逆になっています。設置時に入れ替えさせてください。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
	技 術 料	
	出 張 料	
	合 計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
げんデンタルオフィス
〒501-0458 岐阜県本巣郡北方町高屋1333
TEL: 058-260-5575
ご署名 印
WEB: <https://www.gen-dental.info> 責任技術者 作業者

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

菊池	富田	三宅
'20/08/06	'20/08/06	'20/08/06