

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	2020 年 3 月 25 日	【対応日】	2020 年 3 月 26 日
【連絡元】	☒ モリタ(担当者: 相田さん)	☐ ディーラー(担当者:)	
	☐ ユーザー	☐ その他()	
【所在地&ユーザー名】	静岡県・柴田歯科医院		

案件No. 19420

電話受付: 中村

現地対応: 中村, MC河野さん

送り状番号:

【機種】

IC Washer · IC Clave · WD-150 · BC-17

(機番: /0044/)

【症状・エラーコード】

器械前方の箱(前方アシスト部)に黄色い液体が溜まっている。
X洗剤 → O水、

【対応方法】

☐ 預かり修理(代替機No.)

☒ 現地対応

対応内容: ☐ 部品交換()

☐ その他 ()

【運転情報】

運転回数: ()回 ※前回メンテからの運転回数

保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認

修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認

備考: ()

※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】

<ICW・WD>

☐ 水

☒ 水 & 温水

<ICC・BC>

☐ 生成器

(アイオニー・)

☐ 精製水購入

【ラック・バスケット種類】

<ICW・WD>

☐ 標準ラック

☐ ハンドピースラック

<止水プラグ使用>

☐ 有 ☐ 無

<SUSフィルター洗浄>

☐ 有 ☐ 無

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

☐ 作業台上 ☐ シンク下

☐ その他()

【現地対応者コメント・所感】

一次側・給水接続ホースの水にゴミと思われる。
→ 給水用ニップリング 紙パッキン交換済み。
(水バブル)