

C 作業報告書

得意店	ふしなビル・歯科		機	ご承認印
住所	愛知県大府市梶田町3-19		大野	
TEL	0562-77-2394	室名		
機種名	ワシヤーライズE79-	メーカー	(株)IHIアグリティック	
型式	IC Washer	号機		
製造		製造	100212	
完了	継続	有料	無料	返金回数
			1029	回

ご依頼内容・現象

定期保守点検。

(ご依頼者 様)

原因

処置

- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
- ☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
- ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
- ☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

点検報告書に基づく作業実施。

お客様への伝言

作業日 2020年10月20日

保守形態	1 保守契約	2 点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 点検外
サービス形態	1 保守契約	2 点検	3 CM	医療機器		特 非特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現場調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC
						80 アフター
						90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	ドアロック(本体)	1		(株)IHI様支給品
	ドアロック(下部)	1		(株)IHI様支給品
	HEPAフィルター	1		(株)IHI様支給品
	UVフィルター	1		(株)IHI様支給品
	洗剤ポンプ	1		(株)IHI様支給品
	洗剤ポンプ	1		(株)IHI様支給品

1	基本・梱付・点検・性能検査 (見積書No.)	30,000
2	技術料 H× 名× 円	
3	派遣料 往復65km× 1名× 100 円	6,500
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6	有料道路	2,260

実施者 名古屋SC 実施者 中川

責任技術者 検印 入力 納品書

取扱業者 (請求先)

(株)IHIアグリティック

(支店名)

(ご旧当番)

(注文No.)

管理No 830283

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社

北野SC 長野SC 千曲SC 大田SC 指原SC
松田SC 松本SC 千曲SC 千曲SC 千曲SC
山崎SC 山崎SC 山崎SC 山崎SC 山崎SC
山崎SC 山崎SC 山崎SC 山崎SC 山崎SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

滅菌センター

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

メディカルケア株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5

TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4974

〒386-0008 長野県上田市住吉260-8

TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

〒387-0013 長野県千曲市小島3172

TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳

⑨A

部品代

0

⑩B

技術料等

41760

⑪

⑫

税別合計金額

41760

消費税

4176

ご請求金額 ¥

45936

納品書宛

C 実施者→営業

NO.1725 P.4/4

エムシーサービス(株)名古屋SC

2020年10月23日 12時41分

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

名称	住所	棟	製造番号	検出番号	検出日	点検者	承認者	受付用 印 シ タ リ マ ス
お客様 納入場所	愛知県名古屋市北区3-19		1002/2	10029	2020年10月20日	伊藤 大樹	承認印	大樹

ドラム機能

- ☒ ドラム開閉動作
- ☒ ドラムバッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドラムツツの折れ・曲がり・押付け強さ
- ☒ ドラム締め付けスベツチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドラムバネルの取付け・キズ
- ☒ ドラムヒンジの動作
- ☒ ドラム手動開放レバーの作動
- ☒ ドラム開放スベツチONの際の開放量
- ☒ 薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)
- ☒ 薬剤レベルセンサー配線・配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・繋ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの漏れ・汚れ
- ☒ ローローポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファン取付け
- ☒ 乾燥ファン動作・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒーターの作動
- ☒ フレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧カスベツチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴム取付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽


- ☒ キズ・凹み・溶接部の電装・割れ
- ☒ 遮光LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり汚掃
- ☒ ツツ接続ゴムツツのへたり・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ ツツバネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ティースレインの色あせ・表示
- ☒ 電源スベツチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクタ極み
- ☒ 端子の緩み・コネクタへの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)
- ☒ 外装・設置
- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタツツの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御バネルカバーの汚れ・損傷
- ☒ 消耗品の交換
- ☒ ドラムバッキン
- ☒ フレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ
- ☒ 性能評価
- ☒ インジケーターによる残量判定(TOSI)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

運転確認
各 否

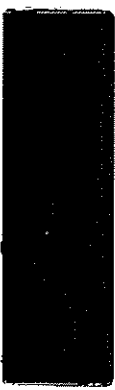

交換部品	数量
ドラムバッキン(本体)	1
バンプツツ(下部)	1
HEPAフィルタ	1
フレフィルタ	1
洗浄ポンプチューブ	1
仕上剤ポンプチューブ	1

※Cは清掃
下は新付
Xは交換