

株式会社IHIアグリテック  
環境プロジェクト部 サービスグループ  
〒704-8122  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL 086-944-6528  
FAX 086-942-9030

# クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

(株)IHIアグリテック用

|     |         |              |              |             |     |                                                                                     |
|-----|---------|--------------|--------------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様 | 名称      | 青柳歯科         | 製造番号         | 300093      | ご確認 |  |
|     | 住所      | 愛知県名古屋市中種区若水 | 納入検査実施日      | 2020年11月10日 |     |                                                                                     |
|     | 3-10-23 | 納入検査実施者      | エーサービス(株) 中ム |             |     |                                                                                     |

| 項目       | 判定 | 検査項目                                                  | 項目    | 判定 | 検査項目                                                                                           |
|----------|----|-------------------------------------------------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ドア・バックシン | ✓  | ハンドル開閉検出確認                                            | 電装系   | ✓  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ                                                                              |
|          | ✓  | ドアロックユニット作動確認                                         |       | ✓  | ディスプレイの色あせ・表示確認                                                                                |
|          | ✓  | ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ                                      |       | ✓  | 電源スイッチの作動状態                                                                                    |
|          | ✓  | ハンドルキズ・汚れ                                             |       | ✓  | SDカードの挿入・取外性                                                                                   |
| 缶体       | ✓  | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無                                        | 外装・設置 | ✓  | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと                                                                         |
|          | ✓  | 滅菌温度センサの汚れ                                            |       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ                                                                             |
|          | ✓  | 棚、トレーのキズ・汚れ                                           |       | ✓  | 本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。                                                                          |
|          | ✓  | 缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性                                   |       | ✓  | アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態                                                                           |
| 給水タンク    | ✓  | 給水タンクの内部汚れ                                            | 制御    | ✓  | キズ・汚れ                                                                                          |
|          | ✓  | 水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性                                     |       | ✓  | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷                                                                              |
|          | ✓  | ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無い                      |       | ✓  | 運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)                                                                          |
|          | ✓  | 装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)                  |       | ✓  | タッチパネル表示確認・履歴の確認                                                                               |
| 排水タンク    | ✓  | LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致                | 性能評価  | ✓  | B&Dテスト実施  |
|          | ✓  | タンク内に汚れはないか                                           |       | ✓  | リークチェックテスト                                                                                     |
|          | ✓  | フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致                                |       | ✓  | 0点調整                                                                                           |
| スペース     | ✓  | 装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)                  | その他   | ✓  | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付                                                                            |
|          | ✓  | 設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと |       | ✓  | 運転・お手入れ方法の説明                                                                                   |
|          | ✓  |                                                       |       | ✓  | 装置内運転時異音                                                                                       |

## 特記事項

※206V(元電圧)