

点検・修理報告書

管理 No. 20200422
発行日: 2020 年 4 月 22 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2020 年 3 月 16 日		作業時間: Hr
顧客名	歯科医院 歯科南荒子の森 様	TEL:	
所在地	愛知県名古屋市市中川区若山町4-43	ご担当 様	
販売店	愛知県名古屋市市中川区若山町4-43	ご担当 様	
納入年月日	2015 年 5 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14090180	運転回数: 5095回
------	----------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー 30 缶体真空異常

原因

・真空ポンプの老朽化により、吸引力が低下しておりました。

処置、作業内容

・真空ポンプの交換をしました。
・機械室ホコリ除去



特記事項

・給水ポンプフィルターおよび排蒸弁フィルターが汚れておりましたので、清掃をいたしました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 6月 30日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	安田
'20/04/22	'20/04/22	'20/04/22

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
検査専用
IHIアグリテック用

お客様	名称	歯科医院 南荒子の森 様	製造番号	14090180	点検実施日	2020・4・22	IHI 承認印		
	住所	愛知県 名古屋市中区川若山町4-43	運転回数	5108	点検実施者				IHIアグリテックサービス
	納入場所	同上	サービス形態	モリタ担当部署					

計装(安全)

- ☐ 圧力計0点指示誤差
- ドア
- ☐ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- ☐ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☐ フック取付け状態・動作確認
- ☐ フックパネ、フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☐ ビス・ナット・ホーローセツ増し締め
- ☐ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☐ フック検出ユニット作動確認
- ☐ ドアロックユニット作動確認
- ☐ 蓋板のキズ・汚れ
- ☐ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- ☐ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☐ 滅菌温度センサの汚れ
- ☐ 網カゴの破損・汚れ
- ☐ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☐ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☐ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☐ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☐ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☐ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☐ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☐ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☐ ストレーナーの汚れ
- ☐ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☐ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☐ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☐ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☐ 大気圧検知圧カススイッチの作動状態・漏れ
- ☐ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☐ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☐ フランジパッキン漏れ
- ☐ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☐ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☐ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☐ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☐ 水漏れ・異常音の確認
- ☐ 真空到達度

給水タンク

- ☐ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☐ 下部給水弁の漏れ
- ☐ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☐ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☐ タンクの汚れ・漏れ
- ☐ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☐ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☐ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☐ 電源スイッチの作動状態
- ☐ 行程表示LEDの点灯
- ☐ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☐ 各基板のコネクター緩み確認
- ☐ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☐ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☐ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☐ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☐ 本体の水平確認・基準傾き内(現地設置時)
- ☐ アジャスタフットの緩み・設置状態(現地設置時)
- ☐ キズ・汚れ
- ☐ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☐ 運転プログラムの確認
- ☐ 入力・出力確認
- ☐ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☐ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☐ エアーフィルターのつまり・汚れ

性能評価

- ☐ ケミカルインジケータによる判定
- ☐ リークチェック

インジケータ貼り付け

☐ gke ☐ ☐ BMS-Test ☐ STEAM

運転確認

☐ 合 ☐ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030