

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHIシパウラ用

お客様	名称	あおぞら歯科 小豆歯科	製造番号	100417	ご確認	太田
	住所	愛知県一宮市森本2-27-8	納入日	2020年10月14日		
			納入検査実施者	エムシーサービス(株)小豆 小豆		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認	
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ	
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと	
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認	
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認	
	✓	洗剤投入量の確認		✓	ラック仕様切換(ハントビースラック・標準ラック)	
	✓	ローラーポンプの動作確認		有・無	温水使用切換 ※現在水のみで使用する 今後変更予定の事	
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	✓	インジケータによる残渣判定(TOSI)	
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一致	
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付	
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)			運転・お手入れ方法の説明 (10/5/18)	
		給湯温度(45～50℃)	その他	✓	装置内運転時異音・振動	
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ		運転検査結果	☒ 良好	トシ
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認			☐ 不良	
	✓	電源スイッチの作動状態				
	✓	SDカードの挿入・取外性				
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)				
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ				

特記事項