

点検・修理報告書

管理 No. 20297
発行日: 2020年10月30日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020年10月30日 作業時間: 8 Hr
顧客名	朝岡歯科メディカルクリニック 様 TEL:
所在地	静岡県浜松市中区中央1丁目15-5 浜松メディカルパーク5F ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店 ご担当 様
納入年月日	2019 年 7 月 21 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100417	運転回数: 1051回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー16 蒸気注入異常が発生した。		
・エラー18 滅菌異常が発生した。		
原因		
・蒸気弁に動作不良が有り、蒸気を注入できない場合があります。		
・安全弁が正常な圧力にもかかわらず、リリースしておりました。		
処置、作業内容		
・蒸気弁と安全弁を新品交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	安全弁		2		
3					
4					
5					
6					
7					

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計	
		技 術 料	
		出 張 料	R2.11.10
		合 計	〒430-0929 静岡県浜松市中区中央1丁目15-5 浜松メディカルパーク5F
			TEL 053-489-6480 FAX 053-489-6481

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20/10/30	20/10/30	20/10/30