

株式会社IHIアグリテック  
 環境プロジェクト部 サービスグループ  
 〒704-8122  
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
 TEL 086-944-6528  
 FAX 086-942-9030

# ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHIシバウラ用

|     |    |               |         |           |     |    |
|-----|----|---------------|---------|-----------|-----|----|
| お客様 | 名称 | 金沢大学病院        | 製造番号    | 100428    | ご確認 | 太田 |
|     | 住所 | 石川県金沢市4-11-18 | 納入日     | 2020.3.10 |     |    |
|     |    |               | 納入検査実施者 | エシエス 小橋   |     |    |

| 項目    | 判定 | 検査項目                               | 項目     | 判定  | 検査項目                                |             |
|-------|----|------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------|-------------|
| ドア    | ✓  | 開閉動作確認                             | 外装・設置  | ✓   | 本体の水平確認 ドアLOCK位置確認                  |             |
|       | ✓  | ドアパッキンキズ・汚れ点検                      |        | ✓   | アジャスタフットの緩み・設置状態                    |             |
|       | ✓  | ドアロックユニット作動確認                      |        | ✓   | キズ・汚れ                               |             |
|       | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認                    |        | ✓   | ドア開閉時装置設置位置がずれないこと                  |             |
|       | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態                   | スペース   | ✓   | 装置設置スペースの確保<br>熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと |             |
| 洗剤ポンプ | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付                    | 制御     | ✓   | 運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認    |             |
|       | ✓  | 洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の濡れ             |        | ✓   | タッチパネル表示確認・履歴の確認                    |             |
|       | ✓  | 洗剤投入量の確認                           |        | ✓   | ラック仕様切替(ハンドピースラック・標準ラック)            |             |
|       | ✓  | ローラーポンプの動作確認                       |        | 有・無 | 温水使用切替                              |             |
| 給排水   | ✓  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ                   | 評価機能   | ✓   | インジケーターによる残渣判定(TOSI)                |             |
|       | ✓  | 排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)      |        | ✓   | 周波数と設置ICWの一致                        |             |
|       | ✓  | お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水/湯逆配管NG)        |        | ✓   | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付                 |             |
|       | ✓  | 給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)          |        | ✓   | 運転・お手入れ方法の説明                        |             |
|       | —  | 給湯温度(45~50℃)                       |        | その他 | ✓                                   | 装置内運転時異音・振動 |
| 電装系   | ✓  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ                  | 運転検査結果 | ✓   | 良好                                  | トシ          |
|       | ✓  | ディスプレイの色あせ・表示確認                    |        | □   | 不良                                  |             |
|       | ✓  | 電源スイッチの作動状態                        |        |     |                                     |             |
|       | ✓  | SDカードの挿入・取外性                       |        |     |                                     |             |
|       | ✓  | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと<br>(漏電・熱注意) |        |     |                                     |             |
|       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ                 |        |     |                                     |             |