

ICC IM-205-1

株式会社IHI物流産業システム
 環境ソリューションBU サービスグループ
 〒704-8122
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL 086-944-6528
 FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

お客様	名称	愛媛県立中央病院様	装置番号	300185	ご確認	藤
	住所	愛媛県愛媛郡東郷町大字	納入検査実施日	2021年8月5日		
	諸般事項	諸般事項中不具合309番	納入検査実施者	ILM 佐藤		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	○	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	○	ドアロックユニット作動確認		○	ディスプレイの色あせ・表示確認
	○	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	○	ハンドルキズ・汚れ		○	SDカードの挿入・取外性
缶体	○	割れ・キズ・腐食・汚れの有無		○	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	○	減菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	○	糊・ドレーのキズ・汚れ	外装・設置	✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	○	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		○	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	○	給水タンクの内部汚れ		○	キズ・汚れ
	○	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	○	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無いか	制御	○	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	○	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
排水タンク	○	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価	✓	B&Dテスト実施
	○	タンク内に汚れはないか		○	リークチェックテスト
	○	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整
	○	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	その他	—	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	○	設置スペースの確保		—	運転・お手入れ方法の説明
	○	右90×左50×背面75×天面250mm以上熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと		✓	装置内運転時異音

特記事項

