

ICC IM-205-1

株式会社IHI物流産業システム
環境ソリューションBU サービスグループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-8528
FAX 086-942-9030

クラスBオートクレープ IC Clave 設置報告書

お客様	名称	寛栄科医院 様	製造番号	300069	ご確認	寛
	住所	岐阜県郡上市八幡町1465	納入設置箇所	207		
			納入設置箇所	207		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パツキン	○	ハンドル開閉検出確認	電	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	レ	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	レ	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	レ	ハンドルキズ・汚れ		○	SDカードの挿入・取外性
缶体	レ	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	レ	減菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	レ	棚、トレーのキズ・汚れ		✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	レ	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		レ	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	レ	給水タンクの内部汚れ	配	✓	キズ・汚れ
	レ	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無いか		レ	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いか)		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		○	B&Dテスト実施
排水タンク	レ	タンク内に汚れはないか	性	レ	リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整
	レ	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いか)		○	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	レ	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	その他	レ	運転・お手入れ方法の説明
				✓	装置内運転時異音

特記事項