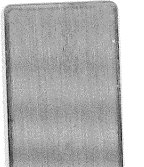


株式会社IHI物流産業システム
環境ソリューションBU サービスグループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

お客様	名称	名馬さくら医院 名馬産歯科 様	製造番号	100562	ご確認	木下
	住所	愛知県名古屋市中村区太閤1丁目20-10	納入日	2021年10月25日		
		名馬プレミアム医療モール2階	納入検査実施者	エムシーサービス(株) 倉本		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	洗剤投入量の確認		✓	ラック仕様切換(ハントピースラック・標準ラック)
	✓	ローラーポンプの動作確認		有・ 無	温水使用切換 <u>水のみ</u>
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一致
	✓	お湯 ・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		✓	運転・お手入れ方法の説明
		給湯温度(45～50℃)		✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	その他		
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認			
	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDカードの挿入・取外性			
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意)			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			
		運転検査結果	☒ 良好 ☐ 不良	トシ 	
			運転時間 107分		

特記事項 ハントピースラックですが、ターゼン、コントラは使用しないという事、
SUS フィルター 交換画面を出ない様にしています

