

点検・修理報告書

管理 No. 210658

発行日: 2021年11月12日

IC Clave		
作業年月日	2021年11月5日	作業時間: 8 Hr
顧客名	羽衣歯科クリニック 様	TEL: 0586-26-0220
所在地	愛知県一宮市羽衣2丁目4-1	ご担当 様
販売店	ササキ(株)名古屋駅前支店	ご担当 甲斐 様
納入年月日	2018 年 2 月 1 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100402	運転回数: 2773回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー 1 1 蒸気発生器高温異常が発生した。		
2. エラー 2 3 蒸気温度センサー故障が発生した。		
原因		
・真空弁からのリークが確認されました。		
・真空弁からのリークにより、蒸気発生器から供給された蒸気がリークし、蒸気発生器内の水が少ない状態となり、蒸気発生器の温度が急上昇したため、エラー 1 1, 2 3が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・真空弁を交換しました。		
特記事項		
・ドアパッキンを交換しました。		
・ハンドルのイモネジに緩みがあったために、交換しました。		
・缶内フィルターのOリングとメッシュを交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空弁		1		
2	イモネジ		1		
3	Oリング		1		
4	メッシュ		1		
5					
6					
7					
			1. 有償	2. 無償	
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 11 月 30 日

ご署名

大木定裕

印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	瀬崎
21/11/5	21/11/5	21/11/05