

点検・修理報告書

管理 No. 210360
発行日: 2021/9/29

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2021年9月29日		作業時間: Hr
顧客名	村田こども歯科 様		TEL: 052-602-8148
所在地	愛知県名古屋市南区大磯通4-19-1		ご担当 様
販売店	中央歯科産業		ご担当 様
納入年月日	2019 年 7 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100383	運転回数: 663 回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・タッチパネルの位置ズレ
- ・エラー7 循環水圧低下

原因

- ・感圧式のタッチパネルの劣化によるものと思われます。
- ・循環ポンプのインペラが割れたため、水が循環できずにエラー7が発生しました。

処置、作業内容

- タッチパネルの交換
- 循環ポンプの交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・タッチパネル		1		
2	・循環ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 10 月 8 日

ご署名

村田 宜彦



修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '21/09/29 菊池	サービスG '21/09/29 小山	サービスG '21/09/29 佐藤