

点検・修理報告書

管理 No. 210568

発行日: 2021年11月22日

IC Clave			
作業年月日	2021年11月5日		作業時間: 8 Hr
顧客名	アサヒ歯科医院 様		TEL: 0581-22-5115
所在地	岐阜県山県市高富1090-2		ご担当 様
販売店	デントオール岐阜		ご担当 佐野 様
納入年月日	2020 年 9 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 300005	運転回数: 1033回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. 真空工程で圧力が下がっていない。		
2. 給水タンクの水が抜けない。		
原因		
1. 圧力センサが故障しており、正しい圧力を表示画面に表示していなかったと考えられます。		
ドアパッキンの劣化が激しく、リークしておりました。		
2. 工場では再現しませんでした。		
処置、作業内容		
1. 圧力センサーとドアパッキンを交換いたしました。		
2. 工場では再現しませんでした。念のため、排水コネクタと給水フィルターを交換いたしました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップいたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサー		1		
2	ドアパッキン		1		
3	排水コネクタ		1		
4	給水フィルター		1		
5					
6					
7					

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
		技 術 料	
		出 張 料	
		合 計	

〒501-2105 岐阜県山県市高富1090-2
 アサヒ歯科医院
 2021 年 12 月 7 日
 院長 旭 律雄 副院長 旭 雄一郎
 TEL 0581-22-5115 FAX 0581-27-3234
 Eメール: fukuro-ash.com 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '21/11/22 池	小 '21/11/22 山	三 '21/11/22 宅