



株式会社IHIシバウラ
機械事業本部 営業サービスグループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030



ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHIシバウラ用

お客様	名称	山本歯科医院	製造番号	100446	ご確認	山本
	住所	福井県越前市元町1-12	納入日	2020.4.28		
			納入検査実施者	エムシーサービス 林. 川村		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	Ⓐ	開閉動作確認	外装・設置	Ⓐ	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	Ⓐ	ドアパッキンキズ・汚れ点検		Ⓐ	アジャスタフットの緩み・設置状態
	Ⓐ	ドアロックユニット作動確認		Ⓐ	キズ・汚れ
	Ⓐ	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		Ⓐ	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	Ⓐ	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	Ⓐ	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	Ⓐ	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	Ⓐ	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	Ⓐ	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		Ⓐ	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	Ⓐ	洗剤投入量の確認		有Ⓐ	ラック仕様切換(ハントピースラック・標準ラック)
	Ⓐ	ローラーポンプの動作確認		無Ⓐ	温水使用切換
給排水	Ⓐ	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	Ⓐ	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	Ⓐ	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		Ⓐ	周波数と設置ICWの一致
	Ⓐ	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)		Ⓐ	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	Ⓐ	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		Ⓐ	運転・お手入れ方法の説明
	Ⓐ	給湯温度(45～50℃)		Ⓐ	装置内運転時異音・振動
電装系	Ⓐ	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	その他		
	Ⓐ	ディスプレイの色あせ・表示確認			
	Ⓐ	電源スイッチの作動状態			
	Ⓐ	SDカードの挿入・取外性			
	Ⓐ	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)			
	Ⓐ	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			
			運転検査結果	☒ 良好 ☐ 不良	トシ

特記事項



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030



クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

IHIシバウラ用

お客様	名称	山本歯科医院	製造番号	100492	ご確認	山本
	住所	福井県越前市元町1-12	納入検査実施日	2020.4.28		
			納入検査実施者	エムシーサービス 木下 川村		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	レ	ハンドル開閉検出確認	電装系	レ	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	レ	ドアロックユニット作動確認		レ	ディスプレイの色あせ・表示確認
	レ	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		レ	電源スイッチの作動状態
	レ	ハンドルキズ・汚れ		レ	SDカードの挿入・取外性
缶体	レ	割れ・キズ・腐食・汚れの有無		レ	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	レ	滅菌温度センサの汚れ		レ	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	レ	棚 1、トレイ 3キズ・汚れ	外装・設置	レ	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	レ	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		レ	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	レ	給水タンクの内部汚れ		レ	キズ・汚れ
	レ	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性	制御	レ	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	レ	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無い		レ	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	レ	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		レ	タッチパネル表示確認・履歴の確認
排水タンク	レ	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価	レ	B&Dテスト実施
	レ	タンク内に汚れはないか		レ	リークチェックテスト
	レ	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		レ	0点調整
	レ	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	その他	レ	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	レ	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと		レ	運転・お手入れ方法の説明
				レ	装置内運転時異音

特記事項