

株式会社IHI物流産業システム  
 環境ソリューションBU サービスグループ  
 〒704-8122  
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
 TEL 086-944-6528  
 FAX 086-942-9030

# ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHIシバウラ用

|     |    |                 |         |                |     |                                                                                     |
|-----|----|-----------------|---------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様 | 名称 | いしかわ歯科医院        | 製造番号    | 100552         | ご確認 |  |
|     | 住所 | 富山県富山市婦中町分田86-3 | 納入日     | 2021.7.29      |     |                                                                                     |
|     |    |                 | 納入検査実施者 | エムシーサービス・木下・川村 |     |                                                                                     |

| 項目    | 判定 | 検査項目                           | 項目     | 判定    | 検査項目                                |
|-------|----|--------------------------------|--------|-------|-------------------------------------|
| ドア    | ✓  | 開閉動作確認                         | 外装・設置  | ✓     | 本体の水平確認 ドアLOCK位置確認                  |
|       | ✓  | ドアパッキンキズ・汚れ点検                  |        | ✓     | アジャスタフットの緩み・設置状態                    |
|       | ✓  | ドアロックユニット作動確認                  |        | ✓     | キズ・汚れ                               |
|       | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認                |        | ✓     | ドア開閉時装置設置位置がずれないこと                  |
|       | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態               | スペース   | ✓     | 装置設置スペースの確保<br>熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと |
| 洗剤ポンプ | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付                | 制御     | ✓     | 運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認    |
|       | ✓  | 洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ         |        | ✓     | タッチパネル表示確認・履歴の確認                    |
|       | ✓  | 洗剤投入量の確認                       |        | ✓     | ラック仕様切替(ハントピースラック・標準ラック)            |
|       | ✓  | ローラーポンプの動作確認                   |        | (有)・無 | 温水使用切替                              |
| 給排水   | ✓  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ               | 評価機能   | ✓     | インジケータによる残渣判定(TOSI)                 |
|       | ✓  | 排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)  |        | ✓     | 周波数と設置ICWの一致                        |
|       | ✓  | お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)    | その他    | ✓     | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付                 |
|       | ✓  | 給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)      |        | ✓     | 運転・お手入れ方法の説明                        |
|       | ✓  | 給湯温度(45~50℃)                   |        | ✓     | 装置内運転時異音・振動                         |
| 電装系   | ✓  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ              | 運転検査結果 | ☑ 良好  | トシ                                  |
|       | ✓  | ディスプレイの色あせ・表示確認                |        | ☐ 不良  |                                     |
|       | ✓  | 電源スイッチの作動状態                    |        |       |                                     |
|       | ✓  | SDカードの挿入・取外性                   |        |       |                                     |
|       | ✓  | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意) |        |       |                                     |
|       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ             |        |       |                                     |

特記事項