

ウオッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書

シバウラ用



株式会社HINIPAWA

環境事業部 環境衛生課

704-8122 岡山県岡山市東区西大森新地 703-0101

TEL088-944-6528

FAX086-842-9030

お客様	名称	1. 木歯科	製造番号	14070125	1. 確認	1. 木
	住所	茨城県大洗市神領 1-12-15	納入検査実施日	2015.12.12		
	納入場所		納入検査・委託・実施者	エムシーサービス株式会社 渡辺勝好		

項目	金額	備註
一、基本資料		
1. 姓名		
2. 性別		
3. 年齡		
4. 學歷		
5. 職業		
6. 婚姻狀況		
7. 子女數		
8. 父母職業		
9. 家庭成員		
10. 其他		
二、生活狀況		
1. 居住環境		
2. 經濟狀況		
3. 社會支持		
4. 生活壓力		
5. 生活滿意度		
6. 生活目標		
7. 生活習慣		
8. 生活興趣		
9. 生活態度		
10. 生活信念		
三、心理狀況		
1. 情緒狀態		
2. 壓力感受		
3. 自我認知		
4. 人際關係		
5. 社會適應		
6. 生活意義		
7. 生活動力		
8. 生活信心		
9. 生活希望		
10. 生活理想		
四、健康狀況		
1. 身體健康		
2. 心理健康		
3. 社會健康		
4. 精神健康		
5. 生活健康		
6. 生活品質		
7. 生活幸福		
8. 生活快樂		
9. 生活滿足		
10. 生活美好		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態			
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	✓	入力・出力確認
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDソケットの反応・汚れ			
	✓	行程表示LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

[illegible]