

IM-302

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

モリタ用
作業用
II-IIIアグリテック用

お客様 お印	名称	製造番号	点検実施日	ご承認印	
	住所	連絡回数	点検実施者		
	納入場所	サービス形態	モリタ担当部署		
	島野修歯科医院	13080010	2019.02.05		
	滋賀県彦根市東町1-10	1185	点検実施者エムシーサービス(株) 京都PS/c 渡辺 陽子		
		サービス形態 メンテナンス定期点検	モリタ担当部署 京都支店 滋賀営業所		

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧カススイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆支弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのへたり・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加熱ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電気系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取り付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準線き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

確認確認	
合	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
扉パッキン L=500	1
扉パッキン L=1500	1
HEPAフィルター	1
入口フィルター	1
DPIチューブ Assy	2
センサーボックス	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

2019/02/12/K 14:02 エムシーサービスセンター FAX番号: 075-283-0411 P.001

C 作業報告書

依頼者	島野修歯科医院 様		ご承認印
住所	滋賀県彦根市中藪1丁目-10		
TEL	0749-26-1825	室名	
機種名	エムシーサービスセンター	メーカー	
型式	WD-150 (号機)	型番	13080010
完了	継続	有料	無料
運送回数	1185		回

ご依頼内容・現象

ベシック定期点検

(ご依頼者 様)

原因

処置

☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)

☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃

☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認

☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)

☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

お客様への伝言

作業日 20 19 年 2 月 5 日

保守	1 点検	2 性能	3 点検	4 点検	5 点検	9 点検	(摘要)
守	守	守	守	守	守	守	守
形	形	形	形	形	形	形	形
態	態	態	態	態	態	態	態
作	作	作	作	作	作	作	作
業	業	業	業	業	業	業	業
分	分	分	分	分	分	分	分
区	区	区	区	区	区	区	区
分	分	分	分	分	分	分	分

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00201120	扉ハ・キル=500	1		790
T00201100	扉ハ・キル=1500	1		1050
T00202460	HEPAフィルター	1		14700
T00202300	メロフィルター	1		520
T00203190	DPIチューブAssy	2		2800
T00201980	センサーボック	1		6800

1	基本・据付	点検	性能	(見積書No.)	13140
2	技術料	H×	名×	円	
3	派遣料	164	名×	100 円	16400
4	宿泊費	泊×	名×	円	
5	諸経費				
6				有料高料代	2950

責任技術者	検印	入力	納品書
京都S/c	渡辺		
TEL 075-283-0410			

取扱業者 (請求先)

管理№ 808468

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社 〒307-0013 花野根千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC 長崎SC つくばSC 仙台SC 大宮SC 新潟SC 金沢SC 長野SC 富山SC 石川SC 福井SC 岐阜SC 愛知SC 三重SC 滋賀SC 京都SC 大阪SC 奈良SC 和歌山SC 鳥取SC 徳島SC 高松SC 香川SC 愛媛SC 高知SC 福岡SC 佐賀SC 大分SC 熊本SC 鹿儿岛SC 沖縄SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター 〒306-0002 長野県上田市住吉250-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

COORE メディカルケア株式会社 〒367-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳

⑨ A

部品代 26660

⑩ B

技術料等

⑪

32490

⑫

個別合計金額 59150

⑬

消費税 4732

⑭

ご請求金額 ¥ 63882

納品書№