

IM-302

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

モリタ用
作業書用
H17アグリテック用

お客様	名称	製造番号	点検実施日	承認印
	住所	送付回数	点検実施者	
	納入場所	サービス形態	モリタ担当部署	

ドア機能

- 開閉動作確認
- ドアバック目視点検
- ドアフックの掛かり・締め付け確認
- ドア締め付けスイッチ作動確認
- インターロック動作確認
- テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ドアパネルの取付け状態・キズ
- ドアヒンジの動作
- ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ローラーポンプの動作確認
- 流量計の検出状態
- 洗剤投入の確認
- 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- 乾燥ファンの取り付け状態
- 乾燥ファンの作動状態・異音
- 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- プレフィルターの汚れ
- メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷・漏れ
- 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 給水弁の作動状態・漏れ
- 給湯弁の作動状態・漏れ
- RO水弁の作動状態・漏れ
- 水位圧カススイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- 乾燥エア回路逆支弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- 循環ポンプの作動状態・異音
- 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- 槽内LEDが各工程色で点灯している
- 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- SDカードの書き込み確認

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
- 消耗品
- ドアバックの損傷・劣化・汚れ
- エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- インジケータによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
○	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
扉ヒモキ2L=1500	1
扉ヒモキ2L=500	1
HEPAフィルター	1
入口フィルター	1
DIPチップAssy	2
タイコンテ-メント	1
循環ポンプ	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ
〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

IM-302

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様	名称	八木歯科	製造番号	100046	点検 実施日	2020/7/13	承認印	八木
	住所	滋賀県大津市神領1-12-15	運転回数	4049 回	点検 実施者	(株)IHIアグリテック		
	納入場所		サービス形態		モリタ 担当者			

計装(安全)

- 圧力計0点指示確認
- ドア
 - フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
 - 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
 - フック取付け状態・動作確認
 - フックパネ・フック調整ピンの取り付け状態
 - ビス・ナット・ホーローセット増し締め
 - ドアカバーの取り付け状態・割れ
 - フック検出ユニット動作確認
 - ドアロックユニット動作確認
 - 盤板のキズ・汚れ

缶体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 減菌温度センサの汚れ
- トレー橋・減菌トレー(網バスケット)の破損・汚れ
- 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排気弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- 減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(減菌室)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧検知圧カススイッチの作動状態・漏れ
- ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異音の確認
- 真空到達度

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 蓋・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各蓋板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の变色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・变色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 側面パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアフィルターつまり、汚れ

性能評価

- B&Dテスト実施
- ケミカルインジケータによる判定
- リークチェック
- キャリブレーションの実施(温度・圧力)

運転確認
合

インジケータ貼り付け

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-8528

FAX:086-942-9030

点検・修理報告書

管理 No. 20074

発行日: 2020年7月9日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020/7/8 作業時間: 8 Hr
顧客名	八木歯科 様 TEL:
所在地	滋賀県大津市神領1-12-15 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2015 年 12 月 15 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

装置情報	製造番号: 100046	運転回数: 4049回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・「排水タンクが一杯です。」の表示が出る。		
原因		
・排水タンクが汚れており、フロートスイッチが上がったままになっていたと考えられます。		
処置、作業内容		
・排水タンクを清掃しました。		
特記事項		
・電池が切れていたため、交換しました。		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 電池		1		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
		部品代 合計		
		技 術 料		
		出 張 料		
		合計		

お客様ご確認事項

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年 7月 29日

ご署名 八木 印

修理業者

株式会社HIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		