

IM-302

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

セリタ局
伊東金岡
IHIアグリテック用

お客様 お印	名称	むとう歯科医院	製造番号	14060072	点検実施日	2021/03/04	ご承認印
	住所	滋賀県彦根市西今町363-5	運転回数		点検実施者	エムシーサービス(株)京都 渡辺 勝 好	
	納入場所		サービス形態	定期保守点検	セリタ担当部署	京都支店滋賀営業所	

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアバック目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過熱防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取り付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
- ☒ 消耗品
- ☒ ドアバックの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認

☒ 合 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

交換部品 (名称・型式)	数量
扉バックシール L1500	1
扉バックシール L500	1
HEPAフィルター	1
入口フィルター	1
DPIチューブ	2
タイコリチューブ	3m

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

C 作業報告書

診療科	むとや歯科医院	ご承認印	
住所	滋賀県彦根市根崎363-5	様	
TEL	0749-21-0008	署	
機器名	シャッター・ディスプレイ・エコー	番号	14060072
型式	WD-150	型番	
完了	継続	有料	有

ご依頼内容・現象	定期点検	(ご依頼者 様)
原因		
処置	☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい) ☒ 各部増締め ☐ 分牌・再セットアップ ☐ 各部清掃 ☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認 ☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい) ☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし	

お客様への伝言	
---------	--

作業日 2021年03月04日

保守形態	1 保守 2 点検 3 修理 4 点検 5 修理 6 点検 7 修理 8 点検 9 修理	(摘要)
カービース形態	1 保守 2 点検 3 修理 4 点検 5 修理 6 点検 7 修理 8 点検 9 修理	
作業区分	00 部品交換 10 部品交換 20 部品交換 30 部品交換 40 部品交換 50 部品交換 60 部品交換 70 部品交換 80 部品交換 90 部品交換	

受付	月	日	時	分
到着時間	月	日	時	分
作業完了	月	日	時	分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00201100	扉バネ	1	1050	
T00201120	扉バネ	1	790	
T00202460	HEPAフィルター	1	14700	
T00202300	入口フィルター	1	520	
T00203190	DP1フィルター	2	2800	
T00202621	9"1/2"フィルター	3	3120	

1	基本・搬付(点検・注油)	(見積書No)	30000
2	技術料	1日×1名×8500円	8500
3	派遣料	166km 往×100円 泊× 名× 名×	16600
4	宿泊費		
5	諸経費		3000
6			4420

責任技術者	税印	入力	納品書
実地者	渡辺		
TEL	072-630-8000		

取扱業者 (前次)	ITHI
(支店名)	
(ご担当者)	
(注文No.)	

管理№ 817300

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

区画機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売	
M エムシーサービス株式会社	F 007-0013 長野県千曲市小島5171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
M 威徳センター	F 006-0002 長野県上野原市200-8 TEL 0269-27-2230 FAX 0269-27-2230
M 威徳センター	F 007-0013 長野県千曲市小島5172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳	
⑬ A	
部 品 代	22,980
⑭ B	
技術料等	62,520
⑮	

⑯	
税別金額合計	85,500
消費税	8,550

ご請求金額 円	94,050
納 品 書 地	