

クラスB オートクレーブ BC-17点検表

お客様 お名前	いすゞ歯科医院 様	製造番号	13080007	点検実施日	2015.03.11	承認 印	白 泉
	住所 京都府京都市西大寺区西大寺1-41	運転時間	1120	点検実施者	エムシーサービス 京都 渡辺 勝子		
納入場所		サービス形態	保守点検	モリタ担当部署	京都支店		

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示装置
- ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック緩衝ピンの取り付け状態
- ☒ ビス・ナット・ボローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 扉板のキズ・汚れ

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 蒸気温度センサの汚れ
- ☒ 視力ゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・放気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 減圧弁の作動状態・漏れ(3万弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3万弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(減圧型)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・破損割れ
- ☒ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他腐蝕割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異常・漏れ
- ☒ 逆止弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度(-92.0kpa)

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 継手の緩み・コネクターの接触確認
- ☒ 配線の黄変・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・放熱)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・蓋年換管内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターのおまり・汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施 
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック (-86.2kpa ~ -86.2kpa) ok
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

運転確認

合格

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1年目はしない。
エアフィルター	
※使用回数1120回~01日にリセット	



株式会社エムシーサービス

機械事業本部営業部 営業所
〒704-8122 岡山県岡山市西区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030