

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2016 年 7 月 27 日

株式会社 I H I シバウラ

配布先		納 入 先	ごとう歯科 様	機 種	BC-17
客 先	1				
環営メ	1	代理店名	(株) モリタ京都支店 様	機 番	13100068
環 品	1	顧 客 名	ごとう歯科 様	納入年月日	平成26(2015)年10月
		修 理 者	(株) I H I シバウラ サービスGr 安田		
計	3	返 送 先	京都府京都市山科小山北溝町33-1	発 送 日	2016年5月日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状)

滅菌工程終了後扉が開かない。

想定原因

圧カスイッチの故障によるものでした。

対応

- ・前回の修理の時にパッキンを交換し内蓋を調整し運転を 10 回以上運転をして確認したのですが確認不足で運転をした後に 1 度扉を開めて再度扉を開けようとする加圧されて扉が開かなくなる現象が再現しました。圧カを確認したところ圧カスイッチが 0 設定がずれていていロックがかかり無理に開けようとするレーバー破損してしまう圧カスイッチの取り換えと内蓋の調整を行い再度運転し 10 回以上運転し再度開け閉めを行い確認しました。確認不足で大変ご迷惑をおかけしました。

その他

附属品 ;

交 換 部 品

承認				
営業サービス '16/07/27 安田				
審査	部品番号	部品名称	数量	備 考
営業サービス '16/07/27 富田		圧カスイッチ	1	
作成				
営業サービス '16/07/27 安田				