

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

お客様	名称 かいはら歯科クリニック	製造番号 14090191	点検実施日 2019年4月19日	点検実施者 IHIAグリテックサービスGr 安田 モリタ担当部署	承認印
	住所 京都府京都市左京区一乗寺染殿町5-1	運転回数 5259			
	納入場所 同上	サービス形態			

計装(安全)

- レ 圧力計0点指示誤差
- ドア
- フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- フック取付け状態・動作確認
- フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ドアカバーの取り付け状態・割れ
- フック検出ユニット作動確認
- ドアロックユニット作動確認
- 蓋板のキズ・汚れ
- 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- レ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- レ 滅菌温度センサの汚れ
- レ 網カゴの破損、汚れ
- レ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- レ フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
- レ シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- レ 給気弁の作動状態・漏れ
- レ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- レ 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- レ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- レ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- レ ストレーナーの汚れ
- レ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- レ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- レ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- レ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- レ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- レ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- レ ソケット他溶接割れ・漏れ
- レ フランジパッキン漏れ
- レ ヒーター取り付け状態・漏れ
- レ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- レ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- レ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- レ 水漏れ・異常音の確認
- レ 真空到達度

給水タンク

- レ 給水タンクの損傷・漏れ
- レ 下部給水弁の漏れ
- レ 盖・取っ手の損傷・割れ

排水タンク

- レ タンクの汚れ・漏れ
- レ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- レ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- レ ディスプレイの色あせ・表示確認
- レ 電源スイッチの作動状態
- レ 行程表示LEDの点灯
- レ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- レ 各基板のコネクター緩み確認
- レ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- レ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- レ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- レ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- レ 本体の水平確認・基準傾き内
- レ アジャスタットの緩み・設置状態
- レ キズ・汚れ
- レ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- レ 運転プログラムの確認
- レ 入力・出力確認
- レ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- レ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- レ エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価

- レ ケミカルインジケーターによる判定
-
-

インジケータ貼り付け

運転確認	
<input checked="" type="radio"/>	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品（名称・型式）	数量
給水タンクは3日に1回は処理後水を抜いてください。	1

株式会社IHIAグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030