

《不具合対応報告書》

担当者: 小山

【発生日】 2019 年 5 月 28 日
【対応日】 2019 年 5 月 28 日
【連絡元】 ☒モリタ(担当者: 佐藤)
☐ユーザー
☐その他()
【ユーザー名&県名】

WD-150

~~IC Washer~~【機番: 13080007】

IC Clave【機番: 】

【症状】

エラー20 排水未開始

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☒現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】☐水

☒水&お湯

【ラック種類】☐標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】、排水センサーブロックから水が吹き出して、排水センサーに水がガカリ、排水が開始できなかった。

・漏洩センサーが作動せず、機器内に水が溜まっていた。(漏洩センサーが反応しなかった理由が不明)

【症状】

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】☐トレイ棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】