

IM-302

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

モリタ用
作業用
IHアグリテック用

お客様	名称	いずみ歯科医院	製造番号	13080007	点検実施日	2019/12/12	承認印	
	住所	京都府亀岡市篠町夕日ヶ丘1-41	運転回数		点検実施者	渡辺・小林		
	納入場所		サービス形態		モリタ担当部署	京都支店		

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の濡れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・濡れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過熱防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
合	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン上	1
ドアパッキン下	1
HEPAフィルター	1
プレフィルター	1
洗剤ポンプ内チューブ	2
シイレットエルボ	1
シイレットカスケード	1
ダイコンチューブセット	1

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

IM-302

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業着用
H1アグリテックE

承認状	名称 いずみ歯科医院	製造番号 1306007	点検実施日 2019/12/12	承認印 
	住所 京都府亀岡市篠町夕日ヶ丘1-4-1	運送回数	点検実施者 渡辺・小林	
	納入場所	サービス形態	モリタ担当部署 京都支店	

計裝(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差

ドア

 - ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
 - ☒ 開閉ハンドル取り付け状態・動作確認
 - ☒ フック取り付け状態・動作確認
 - ☒ フックバネ、フック降番ピンの取り付け状態
 - ☒ ピス・ナット・ホーローセット直し締め
 - ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
 - ☒ フック検出ユニット作動確認
 - ☒ ドアロックユニット作動確認
 - ☒ 蓋板のキズ・割れ
 - ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

每株

- | | |
|---|----------------|
| ✓ | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無 |
| ✓ | 減菌温度センサの汚れ |
| ✓ | 網カゴの破損、汚れ |
| ✓ | 缶内スレーナーの損傷、汚れ |

配管系

- ✓ フッソ樹脂チューブ・絶手の損傷、濡れ
- ✓ シリコンチューブ・絶手の損傷、濡れ
- ✓ 給気弁の作動状態・濡れ
- ✓ 排気弁の作動状態・濡れ
- ✓ 真空・乾燥弁の作動状態・濡れ
- ✓ 減圧弁の作動状態・濡れ(3方弁)
- ✓ ドレン弁の作動状態・濡れ(3方弁)
- ✓ ストレーナーの汚れ
- ✓ 排水・給水タンク水抜きコネクタの濡れ・破損
- ✓ 安全弁(減圧型)の濡れ
- ✓ 安全弁(蒸気発生器)の濡れ
- ✓ ダンプナーの濡れ・溶接割れ
- ✓ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・濡れ
- ✓ ラジエーターの取り付け状態・濡れ

蒸氣發生器

- | | |
|---|--------------------|
| ✓ | ソケット他溶接割れ・漏れ |
| ✓ | フランジパッキン漏れ |
| ✓ | ヒーター取り付け状態・漏れ |
| ✓ | 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態 |
| ✓ | 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ |
| ✓ | 逆弁の作動状態・漏れ |

真空ポンプ

- ☒ 水濡れ・異常音の確認
☒ 真空到達度

給水タンク

- ✓ 給水タンクの損傷・漏れ
- ✓ 下部給水弁の漏れ
- ✓ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ✓ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- | | |
|---|------------------|
| ✓ | タンクの汚れ・漏れ |
| ✓ | フロートスイッチの作動状態・汚れ |

鐵薩系

- ✓ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ✓ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ✓ 電源スイッチの作動状態
- ✓ 行程表示LEDの点灯
- ✓ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ✓ 各基板のコネクター緩み確認
- ✓ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ✓ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ✓ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ✓ ヒーター配線の緩み・変色有無（ボイラー・乾燥機）

外装・設置

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ | 本体の水平確認・基準傾き内 |
| ✓ | アジャスタフットの経み・設置状態 |
| ✓ | キズ・汚れ |
| ✓ | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・傾斜 |

制碑

- | | |
|---|----------------------|
| ✓ | 運転プログラムの確認 |
| ✓ | 入力・出力確認 |
| ✓ | 試験運転プログラムの実行・異常動作の有無 |

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
☒ エアークリフィルターのつまり、汚れ

性能評價

- | | |
|---|---------------------|
| ✓ | 日&Dテスト実施 |
| ✓ | ケミカルインジケーターによる判定 |
| ✓ | リークチェック |
| ✓ | ギャリブレーションの実施(温度・圧力) |

インジケータ貼り付け

運輸確認

☒ 合 ☐ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ファパツキ2	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:088-944-8528

FAX: 086-942-9030