

点検・修理報告書

管理 No. 323698

発行日: 2021年12月2日

クラスBオートクレープ BC-17			
作業年月日	2021/11/25		作業時間: Hr
顧客名	志賀歯科医院 様		TEL:
所在地	京都府京都市山科区御陵原西町5-2		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 2 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13100078	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー26 滅菌温度低温異常		
エラー10 蒸気発生器高温異常		
原因		
給水回路にゼリー状の汚れが付着しており、給水ポンプが作動せず		
蒸気発生器へ水を送る事ができなくなり、エラーが発生したと思われます。		
処置、作業内容		
給水回路ホースを全部外して清掃を実施。給水ポンプの分解清掃。		
給水回路の組付け。給水ポンプの組付け。		
特記事項		
給水タンク及び給水タンクを設置する所は定期的に清掃をお願いします。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1.有償 2.無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 12 月 15 日

ご署名 志賀 山

印

修理業者

株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '21/12/02 池	小 '21/12/02 山	久 '21/12/02 岡