

点検・修理報告書

管理 No. 2018.11.23

発行日: 2018年 11月 23日

IC Washer			
作業年月日	2018 年 11 月 23 日		作業時間: 6 Hr
顧客名	西嶋歯科クリニック		TEL:
所在地	和歌山県新宮市千穂1-1-48		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100163	運転回数: 785	タッチパネル Ver. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー1 漏洩検知			
原因			
・乾燥ラインジョイント亀裂による水漏れ			
処置、作業内容			
・乾燥ラインジョイント交換 (対策品)			
特記事項			
洗浄層内部のストレーナーの目つまり、器具等混入してますストレーナーを通過すると循環水ポンプの破損につながります ポンプ破損は高額な修理費が必要になりますので注意を宜しくお願いします。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	エアール型ジョイントA温風		2		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018 年 12 月 6 日

ご署名

西嶋 - 路

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
	桐 '18/11/23 野