

# 点検・修理報告書

管理 No. 20497  
発行日: 2020年11月20日

|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クラスBオートクレーブ IC Clave |                                                                                                                                    |
| 作業年月日                | 2020/11/13 作業時間: 8 Hr                                                                                                              |
| 顧客名                  | 木下歯科クリニック 様 TEL:                                                                                                                   |
| 所在地                  | ご担当 様                                                                                                                              |
| 販売店                  | ご担当 様                                                                                                                              |
| 納入年月日                | 年 月 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 付属品                                                               |
| 作業区分                 | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                                |
| 出張・引取                | 修 理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

|                                                               |              |            |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 装置情報                                                          | 製造番号: 100434 | 運転回数: 561回 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                               |              |            |
| ・エラー 2 6 停電異常が発生した。                                           |              |            |
| ・水漏れがあった。                                                     |              |            |
| 原因                                                            |              |            |
| ・サーキットプロテクタが作動し、切れておりました。                                     |              |            |
| ・製品には異常はありません。サーキットプロテクタが定格よりも少し高感度になっており、正常な運転状態で作動してしまいました。 |              |            |
| 処置、作業内容                                                       |              |            |
| ・サーキットプロテクタを新品交換しました。                                         |              |            |
| 特記事項                                                          |              |            |
| ・水漏れについては再現いたしませんでした。                                         |              |            |

|   | 交換部品名称     | 部品コード | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|------------|-------|----|----|----|
| 1 | サーキットプロテクタ |       | 2  |    |    |
| 2 |            |       |    |    |    |
| 3 |            |       |    |    |    |
| 4 |            |       |    |    |    |
| 5 |            |       |    |    |    |
| 6 |            |       |    |    |    |
| 7 |            |       |    |    |    |

|                                                                                  |       |       |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--|
| お客様ご確認署名欄<br>・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。 | 1. 有償 | 2. 無償 | 部品代 合計 |  |
|                                                                                  |       |       | 技 術 料  |  |
|                                                                                  |       |       | 出 張 料  |  |
|                                                                                  |       |       |        |  |
|                                                                                  |       |       | 合計     |  |

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528  
FAX: 086-942-9030

木下歯科クリニック  
院長 木下 和哉  
和歌山市西小二里2-4-87  
フェリキタス西浜101  
TEL 073-488-7943

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 品証        | 責任技術者     | 作業者       |
| 菊池        | 富田        | 三宅        |
| '20/11/20 | '20/11/20 | '20/11/20 |