

株式会社IH物流産業システム
環境ソリューションBU サービスグループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

ウオッシャーデイスインフエクターIC Washer 設置報告書

IHシバウ用

名称 お客様	ウエダ歯科 様		製造番号	ご確認
	住所 和歌山県有田郡有田川町大字徳田563-6	納入日 2021年 12月 22・23日	納入検査実施者 エムシーサービス (株)	
	黒田			

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタツットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット動作確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認	✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと	
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサー配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	洗剤投入量の確認		✓	ラック仕様切換 (ハットピースラック・標準ラック)
	✓	ローラーポンプの動作確認		有・無	温水使用切換
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価性能	✓	インジケーターによる残渣判定 (TOSI)
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一致
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無いか、水／湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・メンテナンス銘板記入貼付
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		✓	運転・お手入れ方法の説明
	✓	給湯温度(45～50℃)		✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転検査結果	☒ 良好 ☐ 不良 トシ	
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認			
	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDカードの挿入・取外性			
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			
特記事項					