

## 小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150点検表

名稱	尼崎口腔衛生センター様	登録番号	13100048	点検実施日	2015年 8月 7日	ご承認印
住所	兵庫県尼崎市南武庫之荘3-24-5	連報時間	470回	時間	点検実施者 エムシービス株西村	
納入場所		サービス形態	定期・保守・フルメンテ	モリタ担当部署	符戸営業所	

## ドア機能

- 開閉動作確認
- ドアパッキン目視点検
- ドアフックの掛けり・締め付け量確認
- ドア締め付けスイッチ作動確認
- インターロック動作確認
- テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ドアパネルの取付け状態・キズ
- ドアヒンジの動作
- ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ドア開放スイッチON時の開放状態

## 洗剤ポンプ

- 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ポンプチューブの漏れ・汚れ
- ローラーポンプの動作確認
- 流量計の検出状態
- 洗剤投入の確認
- 洗剤レベルセンサーの作動確認

## 乾燥ユニット

- 乾燥ファンの取り付け状態
- 散熱ファンの作動状態・異音
- 散熱ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- プレフィルターの汚れ
- メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

## 配管系

- ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷、漏れ
- 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 給水弁の作動状態・漏れ
- 給湯弁の作動状態・漏れ
- RO水弁の作動状態・漏れ
- 水位圧力スイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- 增栓期の取り付け状態盛・漏れ
- 乾燥エア回路逆支弁の作動状態・漏れ

## ポンプ

- 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- 循環ポンプの作動状態・異音
- 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- 排水ポンプの作動状態・異音

## 洗浄槽

- キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- 槽内LEDが各工程色で点灯している
- 洗浄アームの回転確認・ペアリング消耗状態
- 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- 排水口フィルターの汚れ・損傷・変形
- 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ヒーター過昇防止器の取り付け状態・漏れ

## 電源系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター締み確認
- 端子の締み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の締み・変色有無(加温・乾燥)

## 外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタットの締み・設置状態
- キズ・汚れ
- 刮削パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

## 消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- エアーフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- 洗剤ポンプチュウブ

## 性能評価

<input checked="" type="checkbox"/>	インジケーターによる残液判定(TOSI)
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

## 運転確認

良好

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
洗剤ポンプキーパー	2

株式会社IHシバウラ

機械事業本部営業部 営業課  
〒704-8122岡山県岡山市東区大寺新地170-6  
TEL 086-844-6528 FAX 086-942-9030