

クラスB オートクレープ BC-17点検表

お客様	名称	溝井 幸 科医院	製造番号	14080154	点検実施日	2016.01.15	ご承認印	溝井
	住所	兵庫県姫路市十二所前50	運転時間	760 回	点検実施者	英崎 SC 栗田		
	納入場所		サービス形態	ベージャックサポート	モリタ担当部署			

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック螺番ピンの取り付け状態
- ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 滅菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッソ樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターをつまみ、汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☐ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック
- ☐ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

運転確認

OK

交換部品 (名称・型式)	数量

株式会社HISHIWARA

機械事業本部営業部 営業地区E2SG
〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030

<IC Washer・WD-150・BC-17 点検・出張修理依頼票兼発注書>

P. 1

(受付票) FAX

株式会社モリタ
支店 支店
担当者 五関 支店
TEL 080-2455-0161 0183515845
FAX 0183514844

- ☒ 保守点検依頼
☐ 修理依頼
☐ TEL 依頼分

㈱IHシパウラー エムエーサービス
担当者 長原 様
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030
026-273-4074
エムエーサービス 奥田 様
0797-38-3225

下記の通り、出張修理を依頼します。

受付No 訪問予定日 受付担当者
2015/2/28 月 日 AM/ PM 安田

依頼日 2014年12月28日 依頼No 担当者 五関
医院名 満井産科医院 様 担当者 院長先生
ご住所 兵庫県姫路市十二所前町30 紫の館ビル2F
TEL 079-222-5427
製品名 BC-17 形式 Ser No
販売店 ヤサキ株式会社 設置日 2014年2月10日

故障状況
12月10日保守点検
午前9:00訪問お預け致しませ。修理指示はございません。

訪問希望日 月 日 9:00 AM PM ベーシックサービス 契約種類
備考 (IHシパウラーコメント)

お客様にアポお願ひします。
年明けにお預け致します。
保守点検の場合:部品交換(有・無)



修理結果を下記の通り、(完了・中間)報告します

訪問日 月 日 担当者
報告内容
☐ 部品交換の上、完了いたしました。
☐ 各部調整により、完了いたしました。
☐ 持ち帰り修理(月 日完了予定です)
☐ 部品待ちの為 月 日に再訪問予定です。
☐ 見積連絡待ちの為、保留中です。

修理業者様へ

- ・アポイントの結果をこの修理依頼票に記載しモリタ拠点にFAXする。
- ・出張修理完了後(翌日まで)、修理結果をこの修理依頼票に記載し、モリタ拠点宛に必ずFAXする。

(印)モリタ 株式会社

2015年12月28日 13時52分

NO. 8608